



Expert 3D<sup>PRO</sup>



Expert 3D<sup>PRO</sup>

Elektriskais piena pumpis



Lietotāja rokasgrāmata

Fig. 1


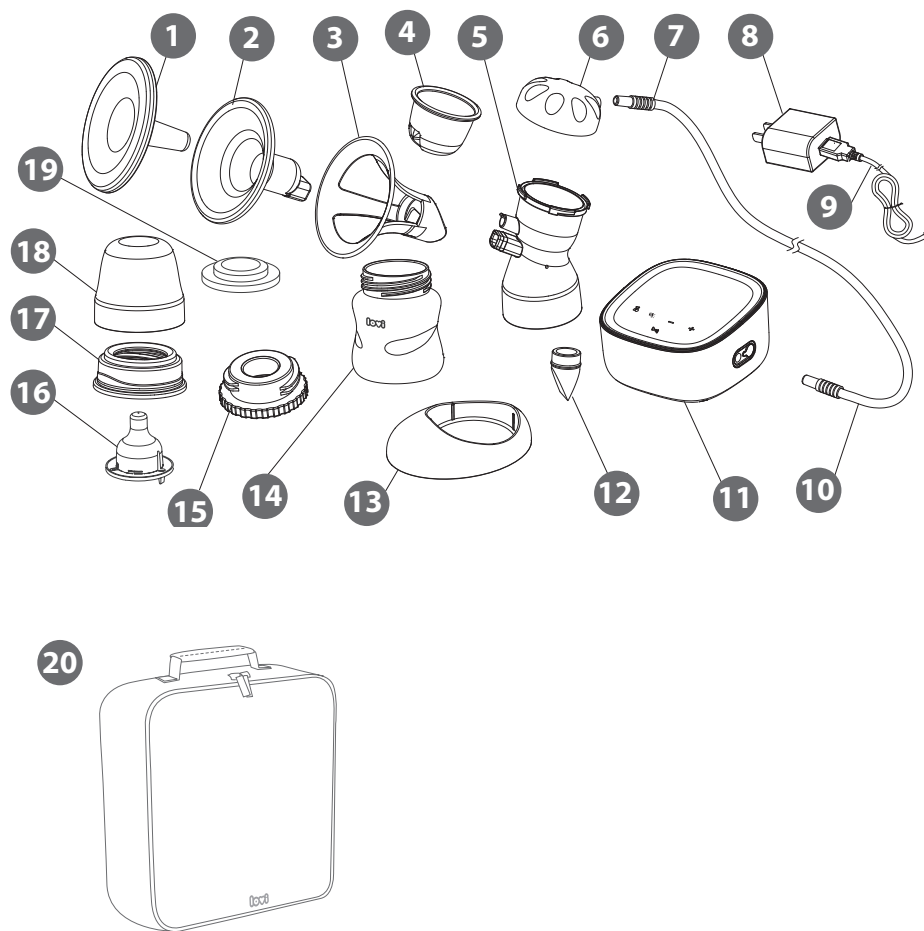


Fig. 2



Canpol sp. z o.o.  
02-884 Warszawa,  
ul. Puławska 430, Poland.  
Biuro, sprzedaż:  
Słubica B, ul. Graniczna 4,  
96-321 Żabia Wola, Poland.  
tel. (+48 46) 858 00 00,  
fax: (+48 46) 858 00 01  
biuro@lovi.pl  
www.lovi.pl

ISO 9001, ISO 22716

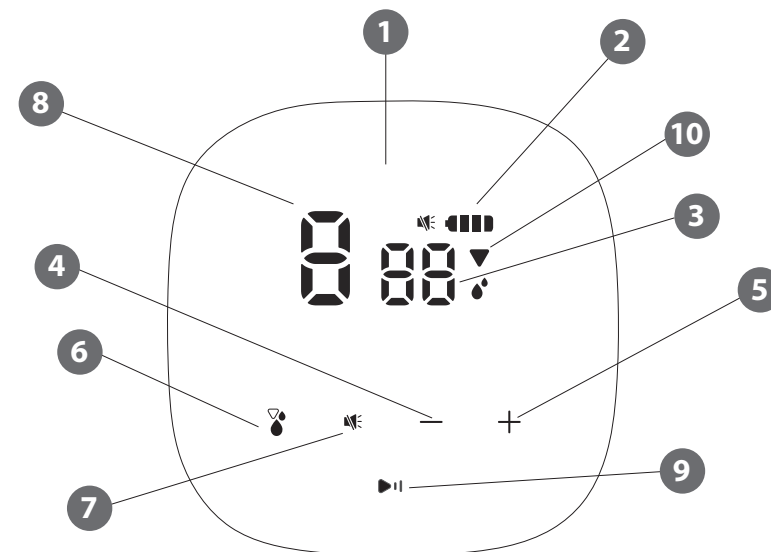

Designed and approved in EU.  
Zaprojektowano i zatwierdzono w UE.  
Разработано и протестировано  
в Европейском союзе.

m001

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

### LOVI Expert 3D Pro elektriskais piena pumpis


Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

#### Svarīga drošības informācija:

Šis lietotāja rokasgrāmatas un drošības informācijas neievērošana var izraisīt briesmas un ierīces darbības kļūmi. Lietojiet ierīci tikai kā paredzēts un aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija ir pakļauta attiecīgām tehniskām izmaiņām.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Piena pumpis ir aprīkots ar skārienekrānu. Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas ikonai, lai sāktu atslaukšanu. Jūs dzirdēsiet skaņas signālu. Katru reizi mainot iestatījumus vadības panelī, jūs dzirdēsiet skaņas signālu. (2. attēls).</p> <p>3. Tajā pašā laikā pumpja agregāts sāk laika atskaiti no 0 līdz 30 minūtēm. Kad taimeris sasniedz 30 minūtes, motors izslēdzas. Ja atslaukšanas laikā pieskaraties ieslēgšanas / izslēgšanas ikonai, pumpis izslēgsies. Vēlreiz pieskaroties ieslēgšanas / izslēgšanas ikonai, atsāksies laika atskaite. Piena pumpis ieslēgsies un nekavējoties sāks darboties stimulācijas fāzē ar pirmo jaudas līmeni.</p> <p>4. Lai stimulēšanas fāzē pielāgotu sūkšanas jaudu savām vajadzībām, noregulējiet tās līmeni, pieskaroties (+) vai (-) ikonām.</p> <p>5. Ja vēlaties sākt atslaukšanas fāzi, nospiediet 6. pogu, 2. att.</p> <p>6. Pieskaroties vadības paneļa ikonām (+) vai (-), jūs varat pielāgot sūkšanas jaudu atslaukšanas fāzē atbilstoši savām vajadzībām. Jūs varat atgriezties no atslaukšanas fāzes stimulācijas fāzē, pieskaroties tai pašai vadības paneļa pogai - 6. poga, 2. att.</p> <p>7. Pieejami 9 stimulācijas režīmi un 9 atslaukšanas režīmi.</p> <p>8. Ja vēlaties izlaist stimulēšanas fāzi vai ja piens sāk plūst ātrāk, pieskarieties 6. ikonai (2. att.), lai nomainītu fāzi.</p> <p>9. Ja ierīce bija pieslēgta elektrotīklam, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas un izslēdziet ierīci, izmantojot galveno slēdzi.</p> |
| <p><b>PIEZĪME!</b> Pirms noņemt piena pumpi no krūts, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Ja nepieciešams, jūs varat noņemt piena pumpi atslaukšanas laikā, novietojot pirkstu starp paliktņi un krūti (tāpat, kā to darāt ar bērnu).</p> <p><b>BRĪDINĀJUMS!</b> Piena pumpis automātiski izslēdzas pēc 30 minūtēm darba. Piena pumpis izslēdzas neatkarīgi no tā, vai tas tika regulēts atslaukšanas laikā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### REŽĪMA SLĒDZIS

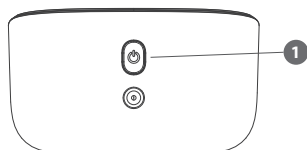

Pēc pieslēgšanas strāvas avotam, nospiediet 9. pogu (2. att.), lai ieslēgtu ierīci. Piena pumpis sāks darboties 1. režīmā - noklusējuma iestatījums. Nospiediet galveno slēdzi (1), kad ierīce ir atvienota no maiņstrāvas barošanas avota, lai sāktu darbību ar akumulatoru. Nospiediet un īsi pieturiet 9. pogu (2. att.), lai sāktu piena pumpja darbību.

#### SŪKŠANAS JAUDA

Izslēdzot un restartējot piena pumpi, tas sāks darbu stimulācijas fāzes 1. režīmā. Ja piens nokļūst zem silikona masāžas spilvena, samaziniet sūkšanas līmeni, lai piens turpinātu ieplūst pudelē.

#### IEVADS

Apsveicam ar LOVI Expert 3D Pro elektriskā piena pumpja iegādi! Tas ir revolucionārs piena pumpis un īsts eksperts laktācijas problēmu risināšanā.

Pateicoties 3D piltuvei, kas ir pietuvināta dabiskai barošanai, šis piena pumpis ir unikāls risinājums. 3D piltuve, atšķirībā no klasiskajām piltuvēm, ne tikai iesūc, bet arī saspiež krūtsgalu. Piltuve ieskauj krūtsgalu un vienmērīgi saspiež krūti, vienlaikus darbojoties vairākās dimensijās, gluži kā mazuļa mute un mēle. Vienmērīgs un maigs spiediens stimulē prolaktīna - hormona, kas atbild par piena ražošanu - izdalīšanos, liekot pienam ātri un dabiski izplūst bez jebkāda diskomforta.

Ekspertu 3D Pro piena pumpis atrisina un palīdz izvairīties no visbiežāk sastopamajām laktācijas problēmām, piemēram:

- krūtsgalu sāpes,
- krūšu piebriešana,
- piena stāze,
- mastīts,

un ātri stimulē piena ražošanu pēc ķeizargrieziņa.

LOVI Expert 3D Pro piena pumpis ir:

- ārkārtīgi efektīvs - āžurs 3D piltuves turētājs uzlabo spiediena uz krūtsgalu kontroli;
- ērts - ļauj atslaukt pienu pat guļus stāvoklī, kas ir ērti pēc ķeizargrieziņa;
- divfāzu darbība - divas atslaukšanas fāzes atspoguļo dabisko mazuļa zīdīšanas ritumu: stimulācijas fāze atdarina ātras mazuļa zīšanas kustības, stimulējot piena ražošanu un atbrīvošanu; atslaukšanas posms atspoguļo lēnāku, dziļāku un efektīvāku zīšanu.

LOVI Expert 3D Pro piena pumpis ir ārkārtīgi efektīvs sarežģītās situācijās.

**PIEZĪME:** LOVI zīmols rekomendē zīdīšanu kā veselīgāko barošanas metodi. Ja barošana ar krūti ir neiespējama vai nav pietiekama, alternatīvu barošanas metodi ieteicams sākt izmantot tikai pēc konsultēšanās ar ārstu, vecmāti vai farmaceitu.

Mātes piens ir veselīgākais un vērtīgākais ēdiens jaundzimušajiem un zīdaiņiem. Tas ir ieteicams kā vienīgais uzturs, ko jūsu mazulis saņem pirmajos sešos dzīves mēnešos. Pēc sešiem mēnešiem tas jāapvieno ar cietu pārtiku.

**PIEZĪME!** Piena pumpis nav paredzēts piena atslaukšanai, kad izsalcis bērns pats nevar iztukšot krūti, t.i., visos gadījumos, kad piena vadi ir aizsprostoti.

#### NODERĪGI PADOMI

##### Kad man vajadzētu lietot piena pumpi?

- Ja iespējams, pagaidiet, kamēr laktācija stabilizējas. Parasti tas notiek 2-4 nedēļu laikā pēc mazuļa piedzimšanas. Izņēmumi:
- Ja krūtis ražo pārāk daudz piena un tās ir pietūkušas un cietas (krūšu piebriešana). Neliela piena daudzuma atslaukšana pirms barošanas vai tā laikā var sniegt jums atvieglojumu un palīdzēt mazulim vieglāk satvert krūtsgalu.
- Krūtsgals ir iegrimis, jo starp barošanas reizēm ir garš intervāls.
- Jums ir ieliekta formas, plakani vai bojāti krūšu gali (piena pumpja lietošana var uzlabot krūtsgala formu).
- Starp barošanas reizēm jūtat piena pārplīnību un nevēlaties modināt mazuli.
- Mazulis ir slims un nevēlas zīst.
- Jūsu krūtis saražo pārāk maz piena, piena pumpja izmantošana starp barošanas reizēm palīdz palielināt piena ražošanu.
- Jūs strādājat vai esat prom no mājām un vēlaties turpināt zīdīšanu. Jums vajadzētu regulāri atslaukt pienu, izmantojot piena pumpi, lai uzturētu dabisko laktācijas procesu.

### Cik bieži man vajadzētu atslaukt pienu?

Ja islaicīgi nevarat barot bērnu ar krūti, ieteicams pienu atslaukt, izmantojot piena pumpi, vismaz astoņas reizes dienā. Tas saglabās jūsu piena ražošanu atbilstošā līmenī. Sākumā jums var būt grūti atslaukt vairāk piena, bet pēc dažām dienām jūs varēsiet atslaukt vairāk. Pat ar stabilu laktāciju, vienā sesijā būs iespējams atslaukt mazāk piena (30-60 ml), tādēļ, lai iegūtu vienu piena porciju, jums var būt nepieciešamas vairākas atslaukšanas sesijas.

### PAMATINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

#### Piena pumpis Nr. 50/070

Ierīce, elektrisks piena pumpis, turpmāk saukts - piena pumpis, ir izstrādājums, kas radīts mātēm, kuras baro ar krūti, piena atslaukšanai. Tas ļauj savākt pienu vēlākai izmantošanai, t.i., gadījumā, ja bērns neatrodas pie mātes. Piena pumpis palīdz saglabāt laktāciju un sagatavoties jūsu plānotai vai neplānotai prombūtnei, piemēram, medicīniska procedūra vai saplaisājuši un sāpīgi krūšu gali.



- Ierīce ir paredzēta personīgai lietošanai.
- Ierīces garantija ir 24 mēneši.
- Pirms lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet drošas lietošanas noteikumus.
- Glabājiet lietotāja rokasgrāmatu kopā ar ierīci.
- Paredzamais produkta kalpošanas laiks ir divi gadi.
- Silikona detaļas var neatgriezeniski mainīt krāsu. Šīs daļas jānomaina pēc tam, kad konstatēta krāsas maiņa vai pēc paredzamā lietošanas laika iztecēšanas.

Ievērojiet ieteikumus par ierīces un tās piederumu pareizu lietošanu. Nekad nelietojiet bojātu vai nepilnīgu / salauztu ierīci.

Bojātās vai nolietotās detaļas nekavējoties jānomaina. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šīs lietotāja rokasgrāmatas nosacījumus un ierīces nepareizas lietošanas dēļ. Jebkurš kaitējums, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ, nav uzskatāms par pamatu sūdzībām vai garantijas remonta pieprasījumiem.

Nepiederošām personām veicot jebkādu izstrādājuma remontu vai modifikācijas, izstrādājuma garantija zaudē spēku un var tikt apdraudēta veselība un dzīvība.




### VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Ja rodas problēmas ar zīdīšanu vai ja, barojot bērnu, jums rodas sāpes, pirms piena pumpja lietošanas jāsāņam ārsta konsultācija.
- Vislabāk piena pumpi pirmo reizi lietot speciālista uzraudzībā.
- Mēs iesakām izlasīt speciālistu literatūru un iepazīt zīdaiņu barošanas principus.

**PIEZĪME!** Nepietiekama sūkšana var izraisīt mazāku atslauktā piena daudzumu, bet pārāk spēcīga sūkšana var izraisīt sāpīgumu atslaukšanas laikā un samazināt piena ražošanu. Ja rodas kāda no šīm problēmām, noregulējiet sūkšanas jaudu (skat. SŪKŠANAS JAUDA).

- Uzturiet ierīci tīru. Novērst putekļu un citu netīrumu nogulsnešanos, kas varētu ietekmēt produkta darbību.
- Rūpēšanās par higiēnu ir būtiska mātes un viņas mazuļa drošībai.
- Ierīces daļas, kuras nevar mazgāt, ir jāaizsargā no ūdens un mitruma iedarbības.

### JAUDAS IESPĒJAS

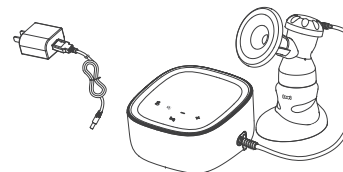

#### Izmantojot maiņstrāvas adapteri

Ievietojiet maiņstrāvas adapteri pumpja agregātam blakus esošajā portā un tad pieslēdziet maiņstrāvas adapteri elektrības kontaktligzdai.

Piena pumpim ir 5V 1A strāvas adapteris. Maiņstrāvas adaptera tapas var atšķirties atkarībā no pārdošanas valsts. Ieteicams izmantot oriģinālo maiņstrāvas adapteri, kas tika piegādāts kopā ar piena pumpi. Tomēr lielākā daļa mobilo tālrunu lādētāju arī ir 5V 1A vai 5V 2A. Tos var pieslēgt, izmantojot USB uzlādes kabeli. Ja adaptera spriegums pārsniedz 5V, tas var sabojāt izstrādājumu. Svarīgi! Pirms izmantojat citu adapteri, pārbaudiet tā spriegumu. Iepriekš minētā norāde attiecas uz valstīm, kurās nedarbojas ES adapteris (komplektā).

#### Izmantojot litija jonu akumulatoru

Akumulators tiek uzlādēts, izmantojot maiņstrāvas adapteri, un tas aizņem apmēram 3 stundas.

**PIEZĪME!** Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pilnībā uzlādēts piena pumpis var darboties apmēram 2/3 ciklus. Lai pagarinātu piena pumpja kalpošanas laiku, neļaujiet akumulatoram pilnībā izlādēties. Kad pumpja agregātu darbina akumulators, displejā tiek parādīts pašreizējais uzlādes statuss. Pašreizējais akumulatora uzlādes statuss tiek parādīts dinamiskā formā. Kad akumulators ir izlādējies, jūs dzirdēsiet skaņas signālu un redzēsiet mirgojošu ikonu. Lietotu akumulatoru var nomainīt tikai ražotāja pilnvarotais servisa centrs.


### LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

#### Pirms katras lietošanas reizes:

- Rūpīgi nomazgājiet rokas.
- Pārlicinieties, ka piena pumpis ir iepriekš izmazgāts un izžāvēts, ja nē, tad izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
- Pārlicinieties, ka silikona šļūtenē nav šķidruma vai mitruma. Nekad neieslēdziet sūkni, ja silikona šļūtenē pamanāt ūdeni. Brīdinājums! Neizpūstiet silikona šļūteni ar muti, lai atbrīvotos no ūdens.


**PIEZĪME!** Pirms atslaukšanas, uzlādējiet akumulatoru.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, pievienojiet maiņstrāvas adapteri pumpja agregātam un ļaujiet akumulatoram uzlādēties.

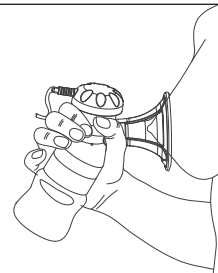


1. Uzlieciet piena pumpi krūtītei tā, lai krūtsgals atrastos dziļi piltuvē (tieši centrā).


**PIEZĪME!** Silikona spilvenam cieši jāpieguļ pie krūts. Pretējā gadījumā sūkšanas jauda var samazināties.

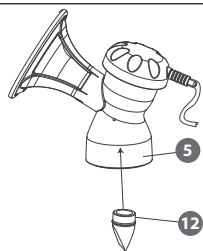


levietojiet pretvārstu (12) piena pumpja korpusā (5). Nospiediet uz leju, pārliecinoties, ka tas cieši pieguļ.

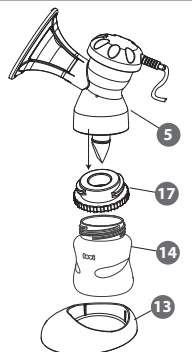

Pieskrūvējiet pudeli (14) ar pudeles adapteri (17) pie piena pumpja korpusa (5). Ievietojiet visu komplektu pudeles statīvā (13). Noņemiet piltuves plastmasas vāku.

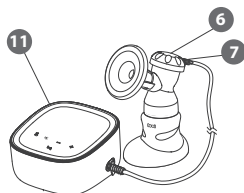

Caurules galos ir 2 savienotāji. Pievienojiet vienu galu caurules savienotājam (7), kas atrodas vākā (6), bet otru galu - ar pumpja agregātam (11). Pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti.

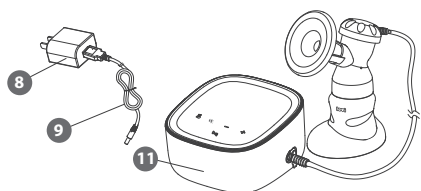

Pievienojiet USB uzlādes kabeli (9) piena pumpja agregātam (11) un maiņstrāvas adapterim (8). Displejā redzamās gaismas diodes iedegsies un izslēgsies, kas nozīmē, ka piena pumpis ir gaidīšanas režīmā, un ierīce sāks akumulatora uzlādi.

#### SKAŅAS BRĪDINĀJUMI

1. Katru reizi, kad tiek nospiesta jebkura poga, pumpja agregāts atskaņo pikstieni.
2. Kad akumulators izlādēsies, jūs dzirdēsiet pikstieni, un piena pumpis izslēgsies pēc 10 sekundēm.
3. Nospiežot skaņas izslēgšanas pogu (7), skaņas tiks ieslēgtas vai izslēgtas.

Šis apzīmējums norāda, ka izstrādājumu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, lūdzu, nošķiriet šo produktu no citiem atkritumu veidiem un nododiet to atsevišķai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādēm jūsu dzīvesvietas tuvumā vai ar izstrādājuma piegādātāju.



Ražotājs apliecina, ka izstrādājums atbilst Eiropas Savienības direktīvām un saskaņotajiem standartiem. Izstrādājums ir marķēts saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūram.



Produkts atbilst direktīvas prasībām attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (LVD) 2014/35/ES, Elektromagnētiskās saderības direktīvai (EMS) 2014/30/ES un RoHS direktīvai 2011/65/ES.

Tā ir II klases ierīce.



**BRĪDINĀJUMS!** Šis izstrādājums nav rotaļlieta. Turiet visas detaļas bērniem nesasniedzamā vietā. Saglabāiet lietošanas instrukcijas, jo tās satur svarīgu informāciju. Partijas kods ir uz iepakojuma.

#### NEPAREIZA IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

- Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir jebkādas bojājuma pazīmes.
- Nekad nelietojiet ierīci, atrodoties vannā.
- Nekad nelietojiet produktu vietās, kur ir iespējama saskare ar ūdeni, piemēram, vannas, izlietnes, virtuves izlietnes vai dušas tuvumā.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja ir iespējams aizmigt.
- Nekad nepievienojiet ierīci maiņstrāvas adapterim ārpus telpām.
- Nekad nelietojiet maiņstrāvas adapteri ar bojātu strāvas vadu. Bojāto maiņstrāvas adapteri var remontēt tikai ražotāja pilnvarots servisa centrs.
- Nekad nelietojiet produktu pretēji tā mērķim un lietošanas nosacījumiem.
- Nepārdodiet lietotu ierīci tālāk.

#### IERĪCES SPECIFIKĀCIJA

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Baterijas        | Litija jonu akumulators 3,7 V, 2200mAh |
| AC elektropadeve | 100-240 V / 50/60Hz                    |
| Maksimālā jauda  | 5 W                                    |



### TĪRĪŠANAS UN DEZINFEKCIJAS INSTRUKCIJA

Pirms pirmās un katras nākamās lietošanas izjauciet krūts sūkni. Nomazgājiet visus krūts sūkņa un pudeles komponentus siltā ūdenī ar vieglu mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojiet un dezinficējiet saskaņā ar zemāk esošajiem noteikumiem.

Pirms pirmās lietošanas dezinficē visus komponentus, kas nonāk saskarē ar mātes pienu (Nr. 2,4,5,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 5 minūtes ievietojot verdošā ūdenī. Tas ir paredzēts higiēnas nodrošināšanai. **PIEZĪME!** Neatstājiet komponentus katla apakšā. Dezinfekcijas laikā apmaisiet ūdeni, lai novērstu sastāvdaļu bojājumus.

- Dezinfekcijas laikā pārļiecinieties, ka visi komponenti ir pilnībā iegremdēti verdošā ūdenī.
- Nevāriet elementus, kuriem nav tieša kontakta ar mātes pienu, un elektriskos elementus.
- Tūlīt pēc vārīšanas izņemiet visus komponentus no ūdens.

Pirms turpmākas lietošanas dezinficējiet visus iepriekš minētos krūts sūkņa un pudeles elementus, ielejot ar verdošu ūdeni vai ievietojot elektriskā vai mikroviļņu tvaika sterilizatorā, lai nodrošinātu higiēnu.

#### BRĪDINĀJUMS! Nav citu elementu, kurus varētu dezinficēt mikroviļņu sterilizatorā.

- Nelejiet ūdeni uz vāciņu (nr.6). Ja uz vāciņa vai vāciņā pamanīsiet ūdeni, izvelciet tases aizbāzni un atstājiet abus elementus nožūt, lai ūdens neiekļūtu caurulēs un sūkņa blokā.
- Brīdinājums! Dezinficējiet silikona caurules ar savienotājiem, plastmasas stiprinājumiem, vāciņu un elektriskiem elementiem. Nieiegremdējiet šos elementus ūdenī. Noslaukiet ar dezinfekcijas līdzekli.

Pēc katras dezinfekcijas pirms salikšanas un nākamās lietošanas pilnībā izžāvējiet gaisā vai ar dvieli. Žāvētas detaļas jāuzglabā hermētiskā traukā vai plastmasas maisiņā. Varat arī izmantot tīru dvieli.

Brīdinājums! Daļēji sausi komponenti var ietekmēt jūsu elektroniskā krūts sūkņa darbību. Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka visas detaļas ir pilnībā izžuvas.

#### Mazgāšanas instrukcija:

- Vienmēr nomazgājiet produktu tūlīt pēc lietošanas, lai noņemtu pienu.
- Atvienojiet cauruli ar savienotājiem. Šie elementi nav jātīra, jo silikona pūslis pasargā tos no saskares ar barību.
- Notīriet visus krūts sūkņa komponentus saskaņā ar iepriekš minētajām instrukcijām.
- Izstrādājuma tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus vai ķīmiskas vielas.
- Noskalojiet ar tīru, karstu ūdeni.
- Ja elementu dezinficēšanai izmantojat elektrisko sterilizatoru, lūdzu, ievērojiet tā ražotāja sniegtos norādījumus.

**Pretvārsts jāmazgā ļoti maigi, un ēdienam nedrīkst ļaut nožūt uz tā virsmas.**

**Uzmanību!** Vienmēr izjauciet pretvārstu, ar diviem pirkstiem satverot tā apaļo pamatni. Uzmanieties, lai nesatvertu vārstu aiz tā gala, jo tas var sabojāt struktūru un vājināt tā iesūkšanas izturību.

apaļa apakša

gals



Brīdinājums! Pirms katras lietošanas pārbaudiet visu elementu stāvokli, vai nav plaisu, plīsumu, krāsas maiņas vai bojājumu, jo tie var ietekmēt ierīces efektivitāti.

#### Kā dezinficēt sprauslu?

Pirms pirmās un katras lietošanas reizes mazgājiet visas produkta daļas un dezinficējiet. Liek uz 5 minūtēm verdošā ūdenī. Tas ir paredzēts higiēnas nodrošināšanai. Pirms katras lietošanas notīriet. Vārošs un ciets ūdens var radīt kaļķa iedarbību. Rūpīgi nomazgājiet visas daļas ar tīru ūdeni, ieskaitot vietas, kas var būt neredzamas, bet kur ēdiens ir pagājis, lai noņemtu visus pārtikas atlikumus. Pēc lietošanas izņemiet atlikušo pārtiku no pudeles un sprauslas, noskalojiet, mazgājiet un dezinficējiet tvaika / elektriskajā sterilizatorā vai verdošā ūdenī. Pudeli var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā (maks. Temp. 60 °C). Nav ieteicams to ievietot trauku mazgājamā mašīnā. Cietās ķīmiskās vielas / mazgāšanas līdzekļi var sabojāt produktu. Nelietojiet nekādus antibakteriālus līdzekļus. Pirms katras lietošanas pārbaudiet barošanas knupi un velciet barotni visos virzienos. It īpaši, ja mazulim ir zobi. Izmetiet pie pirmās bojājuma vai vājuma pazīmes. Nevelciet pudelītes bloķēšanas gredzenu, jo tas var traucēt zīles ventilāciju. Vienmēr pārbaudiet, vai nav noplūdes. Nekad nekādā gadījumā nepalieliniet zīdīšanas plūsmas caurumus, jo tas var sabojāt sprauslu. Esiet īpaši piesardzīgs, sildot mikroviļņu krāsni. Vienmēr apmaisiet sildītu ēdienu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūras sadalījumu, un pārbaudiet šķidruma temperatūru, pirms to dodat bērnam. Sildot ēdienu mikroviļņu krāsnī, atcerieties atstāt pudeli atvērtu. Nenovietojiet produktu karstā krāsnī un nesildiet gāzes / elektriskajā plīts. Neatstājiet barošanas pudeli tiešā saules gaismā vai karstumā, kā arī neatstājiet dezinfekcijas līdzekli ("sterilizējošā šķīdumā") ilgāk, nekā ieteicams, jo tas var vājināt sprauslu. Ieteicams nomainīt knupi maks. pēc 2 mēnešu lietošanas. Saglabājiet instrukciju vēlākai lietošanai. Pudele izgatavota no polipropilēna. Partijas kods ir uz iepakojuma.

### Jūsu bērna drošībai un veselībai

#### BRĪDINĀJUMS!

Nepartraukta un pagarināta šķidrumu sūkšana var izraisīt zobu bojāšanos.

Vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru pirms barošanas.

Izmetiet produktu pie pirmajam bojājumam vai vājuma pazīmēm.

Neizmanto tos piederumus turiet bērnam nepieejamā vietā.

Nekad nepievienojiet auklas, lentes vai valīgas apģērba daļas. Bērns var nožņaugties.

Nekad nelietojiet knupšus māneklīša vietā.

Vienmēr lietojiet šo produktu pieaugušā uzraudzībā.

### KOMPONENTU KOMPLEKTS


#### Piena pumpja detaļas, 1. att.

1. Piltuves pārsegs
2. Silikona masāžas spilvens (saukts arī par piltuvi)
3. Piltuves turētājs
4. Silikona membrāna
5. Piena pumpja korpusa
6. Vāks
7. Cauruļu savienotāji, 4 gab.
8. Maiņstrāvas adapteris
9. USB uzlādes vads
10. Caurule, kas savieno pumpja korpusu ar agregātu, 2 gab.
11. Pumpja agregāts
12. Pretvārsts, 3 gab.
13. Pudēļu plaukts
14. Pudele, 1 gab.
15. Skrūves gredzens
16. Uzgalis
17. Pudeles adapteris
18. Nosūcējs/konteiners ar gradāciju
19. Blīvēšanas disks
20. Uzglabāšanas nodaļums


#### Displejs, 2. att.

1. LCD displejs
2. Akumulatora uzlādes līmenis
3. Darbības laiks
4. Vakuuma samazināšanas poga
5. Vakuuma palielināšanas poga
6. Fāzes indikators - stimulēšana vai atslaukšana
7. Klusuma poga
8. Sūkšanas jaudas līmenis
9. Ieslēgšanas / izslēgšanas pauzes slēdzis
10. Režīma indikators - stimulācija vai atslaukšana

### LOVI ELEKTRISKĀ PIENA PUMPAJĀ SALIKŠANA

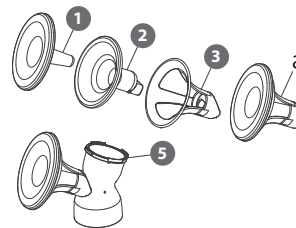

Ievietojiet silikona masāžas spilvenu (2) piltuves turētājā (3). Pēc tam samontējiet piltuves vāku (1), lai iegūtu elementu „a”. Svarīgi! Pārļiecinieties, ka spilvena malas vienmērīgi pieguļ piltuves turētāja malām. Ņemiet vērā, ka abi elementi ir profilēti un tiem jābūt pareizi savietotiem. Pievienojiet elementu „a” piena pumpja korpusam (5).

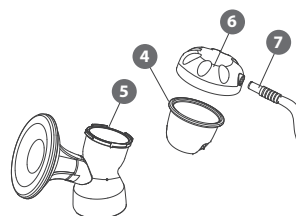

Ievietojiet silikona membrānu (4) piena pumpja korpusā (5), pārklājiet to ar vāku (6). Cieši uzskrūvējiet vāku piena pumpja korpusam. Pievienojiet cauruļu savienotāju (7). Nospiediet uz leju, pārļiecinoties, ka tas cieši pieguļ.